

REVIVE TC³

Transepidermalna rewitalizacja skóry
oparta na medycznym kwasie TCA

WYRÓB MEDYCZNY



REVIVE TC³

WSKAZANIA

MED. PEEL

- Redukcja zmian trądzikowych (zaskórników) i powierzchniowych blizn
- Przebarwienia różnej etiologii

POWDER MASK

- Utrata blasku i zdrowego kolorytu skóry
- Brak napięcia i jędrności skóry
- Widoczne powierzchowne zmarszczki

OPIS

Dwuetaповy zabieg biostymulujący, dający natychmiastowy efekt napięcia, wygładzenia oraz odświeżenia i rozświetlenia skóry. Unikalny protokół zabiegowy składa się z dwóch produktów, które uzupełniają swoje działanie.

DWUETAPOWY ZABIEG

Etap 1



5 x 5 ml

- **MED. PEEL** wyrób medyczny II klasy, składa się z **12% kwasu TCA**, **4% kwasu kojowego** oraz **5% migdałowego**. Powierzchnowy peeling chemiczny, działający na warstwę rogową i ziarnistą naskórka, wspomaga odnowę komórkową, redukuje zmarszczki, zmiany potrądzikowe, blizny oraz przebarwienia na skórze.

Etap 2



5 x 2 ml

- **POWDER MASK** maska w postaci sproszkowanej **20% wit. C (sodium ascorbate)**, która aktywuje się w roztworze zawierającym **kwas ferulowy** i **kwas hialuronowy**. Natychmiastowo rozświetla, ujędrnia i napina skórę, tym samym zwiększając efektywność peelingu zastosowanego w pierwszym etapie.

REVIVE TC³



- 1** Usuń makijaż i przygotuj skórę do zabiegu za pomocą preparatu dedykowanego **pre-peel**.
- 2** Korzystając z miarki pobierz 2-5ml **MED PEEL**, a następnie nałóż cienką warstwę za pomocą pędzelka lub jednorazowej gazy. Zalecany czas pozostawienia na skórze: **5-8 minut**. Usuń pozostałości produktu letnią wodą.
- 3** Przygotuj **POWDER MASK** zgodnie z instrukcją*, następnie nałóż na cały obszar zabiegowy.
- 4** Po ok. 2-3 h klient samodzielnie w domu zmywa aktywną maskę za pomocą letniej wody.

*INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA POWDER MASK:

- Oderwać element nakrętki zgodnie ze strzałką i usunąć plastikowe zabezpieczenie.
- Wcisnąć kapsel w celu uwolnienia sproszkowanej witaminy C do roztworu.
- Wstrząsnąć roztwór ok. 30 sek., pozostawić na ok. 1 min.
- Otworzyć fiolkę i pobrać preparat.

REVIVE TC³ MED PEEL

WYRÓB MEDYCZNY

SKRÓCONE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nazwa: REVIVE - TC³ Med Peel

Kategoria produktu: Wyrób medyczny

Przewidziane zastosowanie wyrobu: Lekki, powierzchniowy peeling chemiczny, działający na warstwę rogową i ziarnistą naskórka, przeznaczony do leczenia łagodnych zmian trądzikowych (zaskórników) i powierzchniowych blizn. Ta mieszanka kwasów zapewnia delikatne złuszczenie z działaniem depigmentacyjnym w leczeniu łagodnej dyschromii. Usuając najbardziej zniszczone warstwy zewnętrzne, wspomaga odnowę komórkową, redukuje zmarszczki, blizny powierzchniowe i przebarwienia na skórze.

Przeciwwskazania: Nie stosować w przypadku chorób skóry i / lub infekcji (zapalenie skóry, opryszczka). Nie stosować, jeśli pacjent jest wrażliwy na jeden lub więcej składników; zalecane jest przetestowanie produktu na niewielkim obszarze ciała (np. skóra przedramienia, skóra za uchem), aby sprawdzić, jak reaguje skóra pacjenta. Nie stosować w czasie ciąży lub karmienia piersią. Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Informacje dla użytkownika lub pacjenta o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu zgodnie z jego przewidzianym zastosowaniem: Szczegółowe informacje, w tym również ryzyko związane z zastosowaniem wyrobu REVIVE - TC³ Med Peel, zostały opisane w instrukcji używania dołączonej do opakowania.

Producent: Vida Srl, Via G. Galilei 4. 56040 Lavoria, Crespina Lorenzana (PI) Italia.

Podmiot prowadzący reklamę /Dystrybutor: URGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa



Retix.C[®]
PROFESSIONAL

MATERIAŁ WYŁĄCZNIE DLA PROFESJONALISTÓW

URGO
AESTHETICS



retixc@pl.urgo.com



[retixc_poland](https://www.instagram.com/retixc_poland)

URGO Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa www.retixc.com