


NAWODNIENIE. STYMULACJA.

DWUTOROWE DZIAŁANIE TYPU BOOSTER.

POZNAJ VENOME H₂O.

Energia w strzykawce.

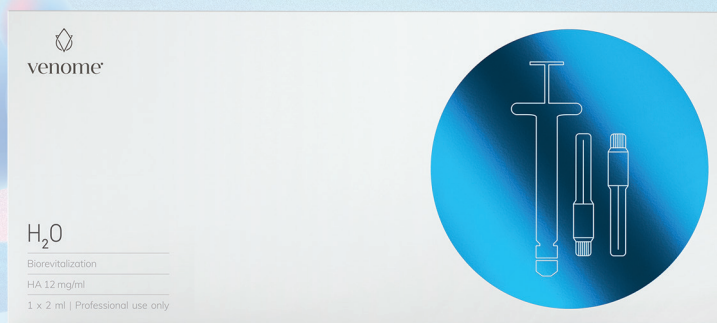

VENOME H₂O

to innowacyjna **terapia stymulująca**, której formuła oparta jest o **fragmentaryczny, wysokocząsteczkowy kwas hialuronowy** w stężeniu **24 mg**, o wyjątkowych właściwościach **regeneracyjnych**, nadająca jednocześnie **objętość i głębokie nawilżenie**.

Preparat wpływa na przywrócenie odpowiedniego **bilansu wodnego** macierzy zewnątrzkomórkowej, **pobudzając** jednocześnie **fibroblasty** do intensywnej produkcji nowych włókien białkowych skóry, dzięki czemu odzyskuje ona odpowiednią jędrność i gęstość.

PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT MEDYCZNY KLASY III.

DLACZEGO VENOME H₂O?

Produkt Venome H₂O oparty jest o innowacyjny, **fragmentaryczny kwas hialuronowy**, który posiada **niezwykłe właściwości stymulujące**, z uwagi na możliwość skutecznej aktywacji receptora **CD44** na fibroblacie, którego pobudzenie skutkuje przyspieszeniem metabolizmu i poprawą wydajności działania komórek.

Rewitalizujący żel H₂O skutecznie **redukuje oznaki starzenia się skóry** poprzez poprawę jej nawodnienia, co przywraca odpowiednie środowisko do pracy fibroblastów. Dzięki zastosowaniu fragmentów kwasu hialuronowego, który ma zdolność **aktywacji receptora CD44**, nowe włókna kolagenowe produkowane są zdecydowanie szybciej, dzięki czemu skóra odzyskuje jędrność i właściwą gęstość, poprawie ulega jej struktura, a **zmarszczki utrwalone i mimiczne** zostają **zredukowane**.

WSKAZANIE



WIDOCZNA WIOTKOŚĆ

UTRATA NAWILŻENIA


ZMARSZCZKI UTRWALONE

OPADAJĄCE CHOMIKI

UTRATA ELASTYCZNOŚCI SKÓRY

UTRACONA GĘSTOŚĆ I JĘDRNOŚĆ

BRAK BLASKU

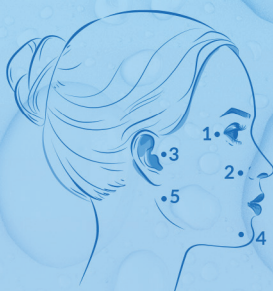

- 1 punkt** - 2 cm w dół od kąta zewnętrznego szpary powiekowej na linii łączącej z kątem żuchwy
- 2 punkt** - 1 cm bocznie od skrzydełka nosa
- 3 punkt** - 1 cm w linii prostej od chrząstki ucha
- 4 punkt** - 2 cm w dół i 1 cm przyśrodkowo od linii nakreślonej od kąta zewnętrznego czerwieni wargowej w dół
- 5 punkt** - 1,5 cm przyśrodkowo i w górę od kąta szczęki

TECHNIKA WYKONANIA ZABIEGU

Produkt Venome H₂O może być podawany w kilku metodach między innymi depozytowo, liniowo wstecznie lub w technice 5-punktów za każdym razem na głębokość skóry właściwej około **1,6-2,2 mm**.

Metoda depozytowa – metoda depozytowa polega na depozytowym podaniu preparatu do skóry właściwej na całej twarzy lub w strefach wymagających szczególnej stymulacji.

Liniowo wsteczna – liniowe podanie produktu do skóry właściwej, w zagłębienia i fałdy skórne, celem wywołania stymulacji skóry w okolicach załamania.

Technika 5 punktów polega na wprowadzeniu igły prostopadle, w głębokie warstwy skóry właściwej oraz pozostawienie depozytów po 0,1-0,3 ml na punkt. Punkty należy rozmieścić w 5 miejscach po jednej i drugiej stronie twarzy. Oznaczone punkty są miejscami bezpiecznymi anatomicznie.