

Zalecenia

Nie używać jeśli fiolka była jakkolwiek uszkodzona/naruszona.

Zawartość fiolki musi zostać zużyta od razu po otwarciu.

Przechowywać w temp. 2°C-30°C

Produkt przeznaczony do stosowania przez profesjonalistę.

Przeciwwskazania/ Skutki uboczne

Zawiera kolagen pochodzenia zwierzęcego ze źródła wieprzowego.

Niemniej jednak, pacjenci, u których zaobserwowano nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, powinni przed jego zastosowaniem zostać poddani testowi poprzez iniekcję miejscową wykonaną na ramieniu, a następnie obserwowani przez 1 godzinę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Niewielkie zaczerwienienie w okolicy wkłucia może wynikać z mechanicznego skutku wprowadzenia igły lub z reakcji skóry. W trakcie aplikacji mogą pojawić się objawy pieczenia/bólu w miejscu iniekcji, które zwykle ustępują spontanicznie w czasie 5-10 minut po zabiegu.

Oczyszczenie skóry/ dezynfekcja jest konieczna przed i po podaniu. Bakterie ropotwórcze mogą spowodować, że w okolicy wkłucia utworzy się ropień.

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA MALYCH DZIECI.

Nie używać po upływie terminu ważności. Termin ważności odnosi się do produktów prawidłowo przechowywanych w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu. Po otwarciu, należy zużyć produkt natychmiast.

Wskazówki dotyczące stosowania

MD-Muscle może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi wyrobami medycznymi z tej samej serii, aby odpowiednio dostosować leczenie, w zależności od sytuacji klinicznej.

Preparat może być stosowany u pacjentów, którzy wymagają suplementacji kolagenu lub miejscowej terapii przeciwzmarszczkowej.