

Przeciwwskazania:

Miejsce wstrzyknięcia musi znajdować się na zdrowej skórze.

Nie wstrzykiwać dożylnie, do mięśni, ścięgien.

Nie mieszać z innymi produktami. Nie wstrzykiwać w obszary objęte stanem zapalnym.

Nie sterylizuj ponownie. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do jednorazowego użytku.

Nie używać ponownie, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia.

Przechowywać w temperaturze 0° -25°C z dala od źródeł ciepła.

Nie zamrażać.

Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Obecność pęcherzyka powietrza nie zmienia w żaden sposób jakości produktu.

Po wstrzyknięciu i przez kolejne 3-5 dni należy poinformować pacjenta, aby uniknąć ekspozycji na promieniowanie UV i chronić leczony obszar za pomocą kremów przeciwsłonecznych.

SKUTKI UBOCZNE PROFHILO Struktura infiltracja poza warstwę skóry może powodować niepożądane efekty lokalne.

Podczas stosowania PROFHILO Struktura objawy takie jak ból, przy wstrzyknięciu może pojawić się uczucie gorąca, zaczerwienienie lub obrzęk.

Zwykle znikają w krótkim okresie czasu. Lekarze muszą upewnić się, że pacjenci powiadamiają ich o wszelkich niepożądanych efektów, które pojawiają się po zabiegu.

PRZECIWWSKAZANIA PROFHILO Structure

Nie może być stosowany w połączeniu z takimi zabiegami, jak laser i średnio głęboki peeling skóry.

Produkt przeznaczony do stosowania przez profesjonalistę.